



دستور العمل کار با دستگاه الکتروشوک

وسایل لازم را آماده کنید: برانکارد، دستگاه الکتروشوک، ژل الکتروکاردیوگرام، چست لید، تست نمودن دستگاه از نظر آماده به کار بودن و سالم بودن

جهت تست نمودن، دستگاه را روشن کنید.

سوئیچ انتخاب مد را روی DEFIB قرار دهید.

پدال ها را به طرز صحیح از محل خود جدا کنید و ژل بزنید.

با استفاده از کلید انتخاب انرژی روی پدال استرنوم یا با استفاده از کلیدهای انتخاب انرژی روی دستگاه مقدار انرژی موردنظر (مثلاً ۳۰ ژول) را انتخاب کنید.

با استفاده از کلید شارژ انرژی روی پدال APEX یا با استفاده از کلید شارژ روی دستگاه، شارژ کنید.

با فشردن همزمان کلیدهای تخلیه انرژی روی پدالها، شوک را تخلیه کنید.

جهت دادن شوک الکتریکی به بیمار، دکمه دستگاه را چرخانده و روی Defibrillator قرار دهید.

انرژی مورد نیاز (۲۰۰-۱۵۰ ژول) را تنظیم کنید.

دکمه هماهنگ کننده را روی وضعیت دفیبریلاتور تنظیم کنید.

مقدار ۲ میلی متر ژل الکتروود را روی سطح پدال ها آغشته کنید.


پدال های دستگاه را به نحوه صحیح در دست بگیرید. (پدال Apex در دست راست و پدال مربوط به sternum در دست چپ قرار گیرد).

پدال sternum در سمت راست و فوقانی استرنوم (دومین فضای بین دنده ای، قاعده قلب) و پدال Apex در فضای پنجم بین دنده ای (نوک قلب) در امتداد خط میدکلاویکولار قرار دهید.


پدال ها را بر روی قفسه سینه بیمار با وزنی حدود ۱۱kg فشار دهید.

برای دادن شوک اعلام آمادگی کنید. هیچ یک از افراد احیاگر با بدن بیمار تماس نداشته باشد و رابط اکسیژن از بیمار جدا کنید.


دکمه شارژ دستگاه را فشار دهید.

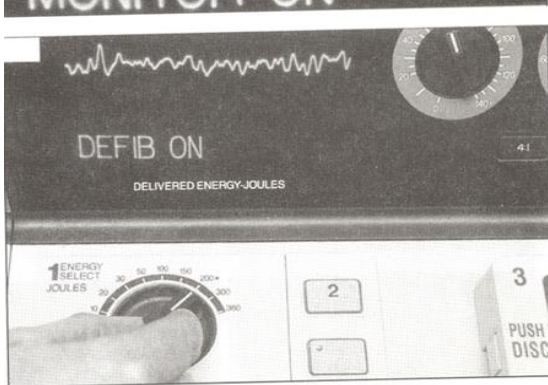

فعال کردن سیستم دفیبریلاتور

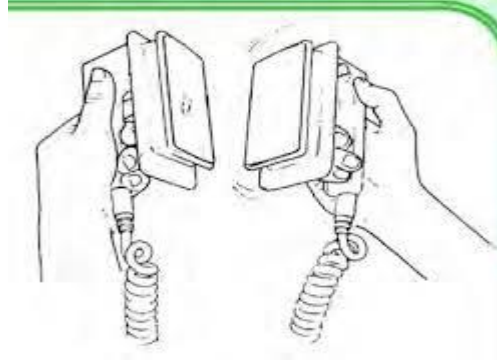

پدال های شوک الکتریکی

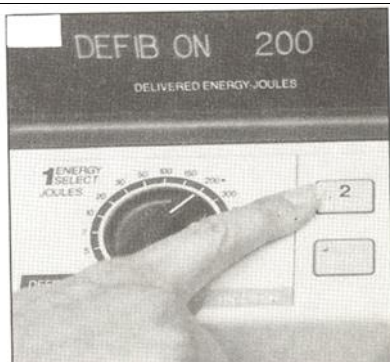

شارژ کردن دستگاه با استفاده از دکمه شارژ



نحوه صحیح قرار گیری پدال ها در دست (پدال Apex در دست راست و پدال مربوط به sternum در دست چپ)



محل قرار گیری پدال ها (پدال sternum در سمت راست و فوقانی استرنوم و پدال Apex در فضای پنجم بین دنده ای در امتداد خط میدکلاویکولار)